

Salivette: cortisol in speeksel

Algemeen

De afname voor cortisol in speeksel gebeurt d.m.v. een Salivette Cortisol (Sarstedt).


Bij gezonde personen vertoont de cortisolconcentratie een dag-nacht ritme. Rond 23u00 is normaal gesproken de cortisolconcentratie in speeksel het laagst.

Niet gebruiken bij kinderen onder de 3 jaar of bij patiënten die riskeren het sponsje in te slikken.

Opmerkingen

- Verzamel het speeksel **op het tijdstip dat met uw arts is afgesproken**.
- Indien er geen instructies doorgegeven zijn, gelieve het speekselstaaf af te nemen 's morgens vóór het poetsen van de tanden.
- Indien de afname in de loop van de dag moet gebeuren, dient dit uitgevoerd te worden minstens 30 minuten na de inname van vaste of vloeibare voeding.

Afname instructies

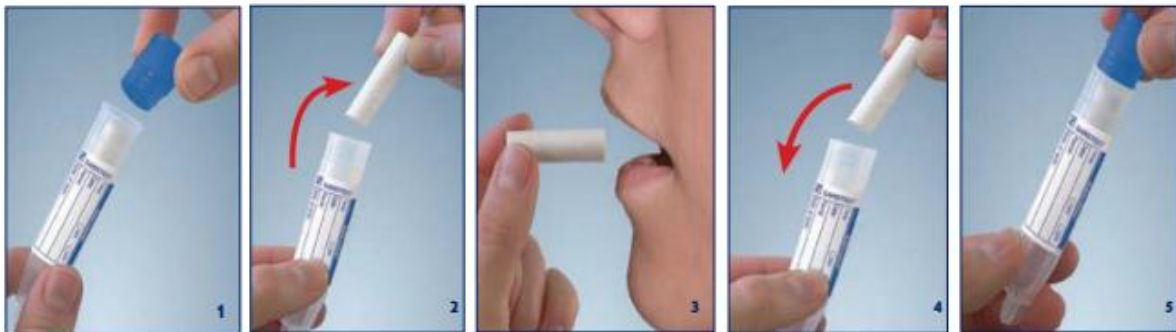

1. Neem de Salivette onderaan vast en verwijder de blauwe stop.
2. Neem de wattenrol uit de Salivette.
3. Plaats de wattenrol in de mond en kauw lichtjes op de wattenrol totdat je het gevoel hebt dat het verzamelde speeksel niet meer in de mond kan gehouden worden (normaal gezien is 1 minuut voldoende).
4. Breng de wattenrol met het geabsorbeerde speeksel terug in het inhangbuisje.
5. Sluit de tube terug af met de blauwe stop

Praktisch

- Noteer **naam, voornaam, datum en uur van de speekselcollectie** op de tube.
- De gesloten Salivette, met gewonnen speeksel, kan tijdelijk in de koelkast bewaard worden.