

Nasopharyngeale wisser

Materiaal

Gebruik nooit dikke wissers voor een nasopharyngeale afname !


Zie afname richtlijn 'Wissers: overzicht, toepassing en gebruik' om na te gaan welke wisser/transportmedium geschikt is voor het gevraagde onderzoek.

Procedure afname

De patiënt begint vaak te niezen of te tranen tijdens de afname. Volg de procedure voor droplet bescherming: maak gebruik van handschoenen, schort en mondmasker.

Waarschuw de patiënt dat dit onderzoek gedurende een kort moment onaangenaam kan zijn.

- Verwijder indien nodig overtollig neussecreties uit het neusgat door de patiënt de neus te laten snuiten.
- Laat de patiënt zijn hoofd achteroverbuigen (70°).
- Schuif de wisser voorzichtig diep in het neusgat (tot in de nasopharynx: ongeveer tot de helft van de afstand van de neus tot het oor) en roteer de wisser een paar keer.
Volg de richting van de neusbodem (niet die van de neusrug).

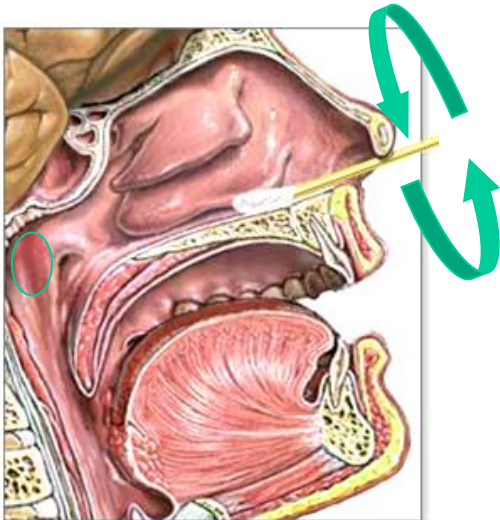

- Verwijder de wisser met een vlotte beweging.
- Breek de wisser af ter hoogte van de rode lijn in de bijhorende transporttube en sluit deze tube goed af.
- Breng de patiëntgegevens aan op de tube.

Bewaring en transport

In afwachting van transport mag de wisser op kamertemperatuur bewaard worden.